

## F-18 用核種ボタンのキャリブレーション番号の変更方法

対象機器：CRC-15R/15W/25R/25W 型

F-18 用核種ボタンに登録されているキャリブレーション番号(439)を、新しい番号(472)に変更する手順は以下の通りです。



メイン画面(測定画面)が表示されていない場合は、HOME ボタンを押してメイン画面を表示して下さい。

↓ UTIL ボタンを押します。




↓ SETUP を選択して下さい。




↓ OTHER を選択して下さい。


パスワードは、S/N(製造番号)の下3桁です。パスワードは機器後部に刻印されています。

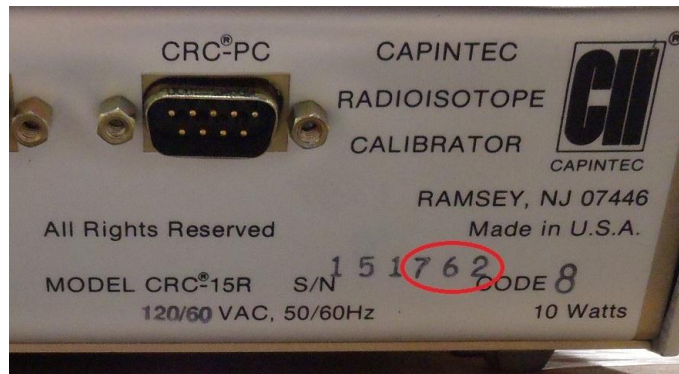


↓ パスワードを入力し、ENTER ボタンを押して下さい。

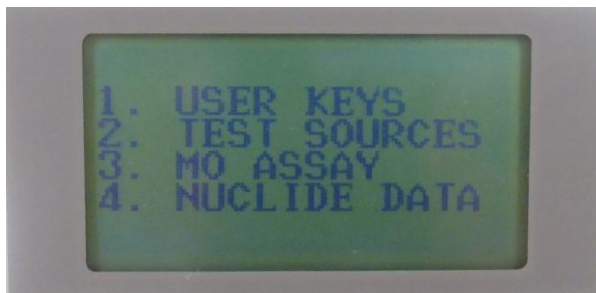

↓ NUCLIDE DATA を選択して下さい。

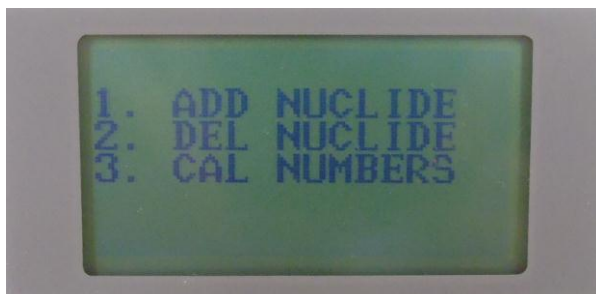

↓ CAL NUMBERS を選択して下さい。

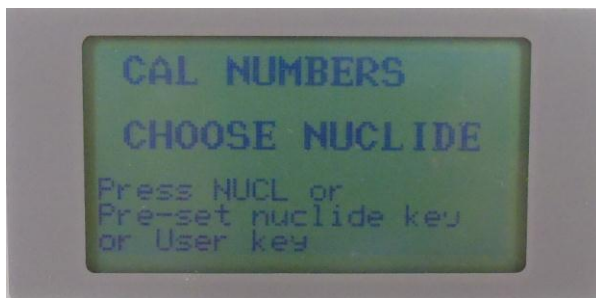


↓ NUCL ボタンを押して下さい。




↓ 318を入力して下さい。



↓ ENTER ボタンを押して下さい。

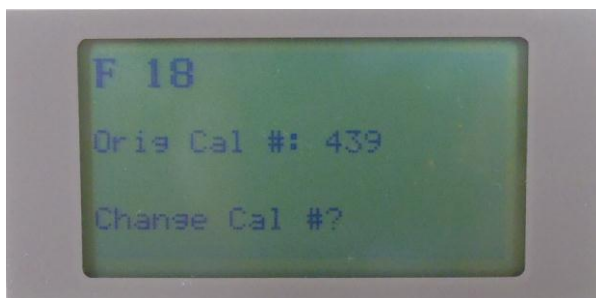


↓ Yを選択して下さい（「9」ボタンを押して下さい）。

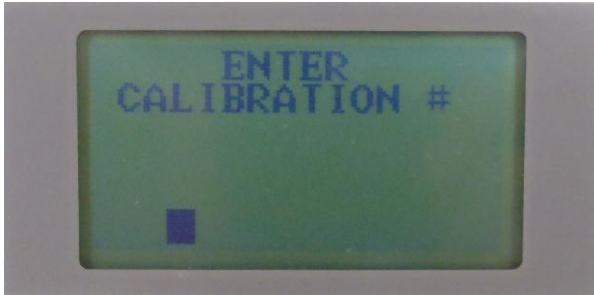


↓ 472を入力して下さい。




↓ ENTER ボタンを押して下さい。

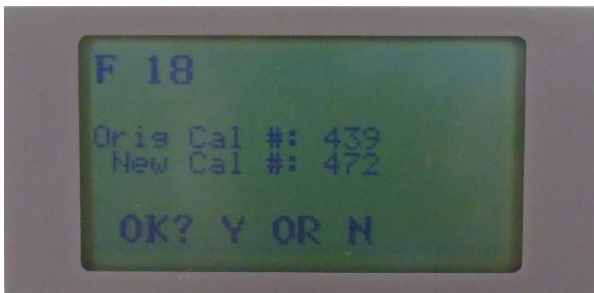

↓ Yを選択して下さい（「9」ボタンを押して下さい）。

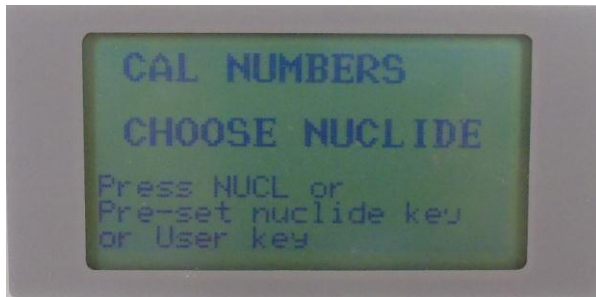

↓ HOME ボタンを押して下さい。元の測定画面に戻ります。

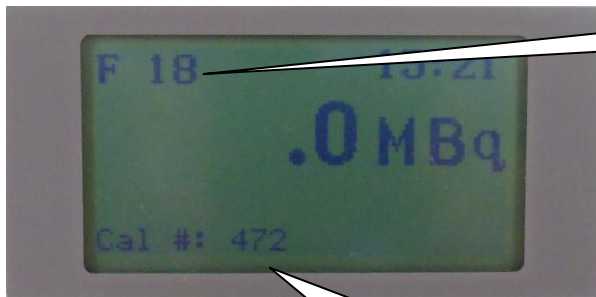

F18 が選択されていることを確認して下さい。

画面下の数値が、472に変更されていることを確認して下さい。以上で設定変更は完了です。