

2016年4月4日

各位

東京都新宿区原町 3-61
アクロバイオ株式会社
Tel : 03-5272-0621 Fax : 03-5272-0623

Capintec 社製 RI ドーズキャリブレータ

ラジウム 223 のキャリブレーション番号について

この度、塩化ラジウム (^{223}Ra) 注射液が発売されるにあたり、Capintec 社製 RI ドーズキャリブレータでラジウム 223 を測定する際のキャリブレーション番号をご連絡いたします。

核種名：ラジウム 223 (^{223}Ra)

半減期：11.435 日

キャリブレーション番号：2 3 3

核種とキャリブレーション番号の登録方法については

・ CRC-55tR / CRC-55tW

「RI ドーズキャリブレータ CRC-55t 核種追加登録手順書」
の「2.2 核種の登録」及び「2.3 核種ボタンの割り当て」

・ CRC-25R / CRC-25W

「RI ドーズキャリブレータ CRC-25R 核種追加登録と USER ボタン割り当て手順書」
の「2.2 核種の登録」及び「2.3 USER ボタンへの割り当て」

・ CRC-15R / CRC-15W

「RI ドーズキャリブレータ CRC-15R 核種追加登録と USER ボタン割り当て手順書」
の「2.2 核種の登録と USER ボタンへの割り当て」

を参照して下さい。

以上